


Antigeeni kiirtest enesetestimiseks ninasõõrme eesosa proovist.

## Kasutusjuhend enesetestimiseks.



**Test tuvastab, kas oled nakatunud kooroonaviirusesse. Positiivne tulemus viitab nakkusohtlikkusele.**

### Testkomplekt

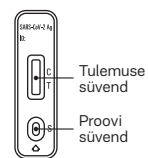

Testialus – 1 tk



Eeltäidetud puhverlahuse katsuti koos tilgutitiotsikuga – 1 tk



Ühekordselt kasutatav vatipulk – 1 tk



Kasutusjuhend



Jäätmekott – 1 tk

### Enne testimist



- Pese või desinfitseeri käed. Kuivata korralikult.




- Nuuska nina.




- Loe läbi kasutusjuhend.

### 1 Testi tegemine

- Ava testialuse pakend ja aseta alus puhtale tasasele pinnale.
- Võta pakendist välja katsuti ja eemalda fooliumkate.

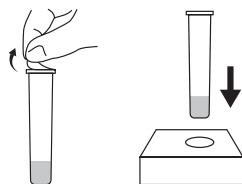


- Eemalda katsutilt fooliumkate.
- Aseta katsuti testkomplekti karbil asuvasse avasusse (hoidikusse).

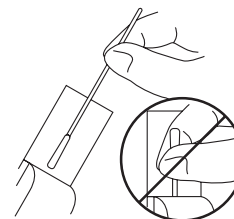

- Võta pakendist välja vatipulk. Ära puutu vatiotsikut!


### 2 Testiproovi võtmine

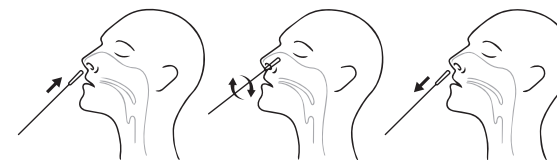



- Sisesta vatipulk ninasõõrmesse KUNI 2,5 cm sügavusele.
- Hõõru vatiotsikut vastu nina sisepinda samal ajal seda 5 korda ümber oma telje keerates.
- Korda sama teises ninasõõrmes. Eemalda vatipulk ninaõõnsusest.

### 3 Testi tegemine

- Sisesta vatipulk katsutisse 30 sekundiks.

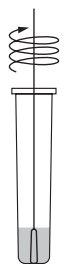

- Keeruta vatipulka lahuses. Hõõru vatiotsa vastu katsuti seina, samal ajal suru katsuti külgi kokku.

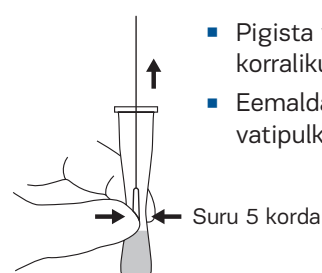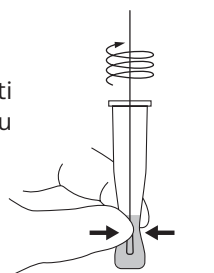

- Pigista vatiots läbi katsuti korralikult kuivaks.
- Eemalda katsutist vatipulk.

- Kinnita katsutile tilgutitiotsik. Raputa katsutit ettevaatlikult või koputa selle põhjale.



- Suru katsuti külgi kokku ja tilguta 4 tilka testialuse proovisüvendisse.




- Fikseeri kellaeg.
- Kasutatud vahendid kogu kotikesse ja viska ära.



### 4 Testi tulemus

- Testialuse testribale ilmub värviline joon või värvilised jooned.
- Vaata testi tulemust 15-30 minuti pärast.
- Pärast 30 minuti möödumist testi tulemust mitte arvestada.

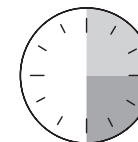


**self**  
diagnostics

Edasimüüja:  
Selfdiagnostics OÜ  
info@selfdiagnostics.com  
tel: 524 0627




Oppevideo

## Testi tulemuse tõlgendamine

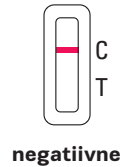


- Ilmub ainult kontrolljoon (C) ja testjoont (T) ei ilmu. See tähendab, et SARS-CoV-2 antigeeni ei tuvastatud. Testi negatiivne tulemus näitab, et tõenäoliselt teil praegu COVID-19 haigust ei ole. Teiste inimestega kokkupuutumisel jätkake kõigi kehtivate eeskirjade ja kaitsemeetmete järgimist. Ka negatiivse testi korral on võimalik, et olete nakatunud. Kahtluse korral korrake testi 1-2 päeva möödumisel, kuna koroonaviirust ei saa nakkuse kõigis staadiumites täpselt tuvastada.

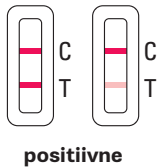

- Ilmuvad nii kontrolljoon (C) kui ka testjoon (T). See tähendab, et tuvastati SARS-CoV-2 antigeen.

**MÄRKUS:** Testjoone (T) piirkonnas ähmase joone olemasolu tuleks lugeda positiivseks.

Testi positiivne tulemus tähendab, et suure tõenäosusega olete nakatunud COVID-19 haigust põhjustavasse viirusesse. Võtke kohe ühendust oma arsti / perearsti või kohaliku terviseameti osakonnaga. Järgige kohalikke eneseisolatsiooni eeskirju. Kinnituse saamiseks on vaja teha PCR- analüüs.

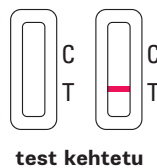

- Kontrolljoont (C) ei ilmu. Kehtetu testi põhjus on tõenäoliselt proovi ebapiisav kogus või testi vale käsitlemine. Lugege juhised uuesti läbi ja korrake testi uue komplektiga.