

Testi läbiviimise meetodid

Ärge avage fooliumpakendit enne, kui te ei ole valmis testi läbi viima.

Ainult testipulgaga testimine



Hoida testipulka urinihoia all 3 sekundit (vaata pilti 1).

Topsi ja testipulgaga testimine




Kasta testipulk topsi kogutud uriini sisse 3 sekundiks (vaata pilti 2)

Pane tähele: jälgige maksimaalset uriini taset!

Asetage test **5 minutiks** fooliumpakendile. Palun pange valmis ka kasutusjuhend rasedusnädala

määramiseks, et selle abil õigesti testi tulemusi tõlgendada. Täpsema info saamiseks lugege juhendi teist poolt.

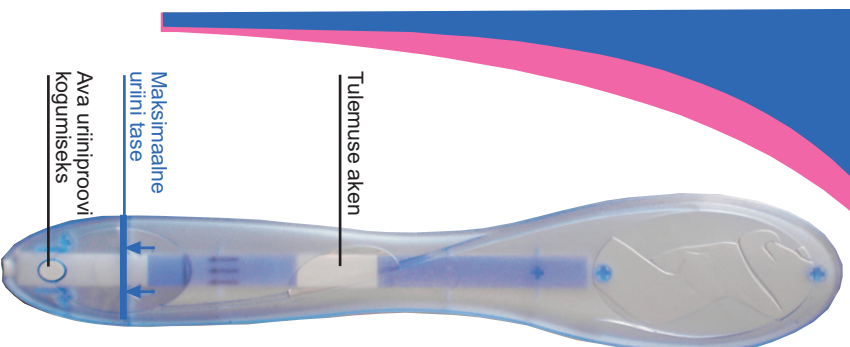


**Rasedustest rasedus-
nädala määrajaga**

Tulemuste tõlgendamine



Kui tulemuse aknasse ilmub kaks lillat joont, on test tuvastanud hCG olemasolu uriinis. Olenemata alurnise testiõone heledusest, võite suure tõenäosusega olla rase. Palun kasutage testiga kaasasolevat kasutusjuhendit 5 minutit pärast testi sooritamist, et määrata raseduse nädal.

Kui testjoon on näha väga õrnalt, viitab see raseduse varajasele staadiumile.

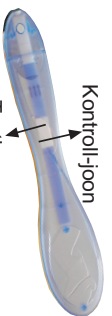

Kontroll-joon
Testjoon



Kui tulemuse aknasse tekib üks lilla joon (kontroll-joon), siis olete külli testi läbi viinud korrektselt, kuid test ei ole tuvastanud hCG uriinis. Suure tõenäosusega te ei ole rase. *Kui teie kuupuhastusrikkal on hilinenud rohkem kui üks nädal, on soovitatav külastada oma arsti, samal ajal aga hoiduge tegevusest, mis võivad embrüot kahjustada (nt. Röntgen).*

Kui tulemuse aknasse ei teki 5-10 minuti jooksul ühtegi lillat joont või tekib ainult testjoon, on test kehtetu. Selle põhjuseks võib olla kahjustunud fooliumpakend, testi vale säilitamine või näiteks vahene urini kogus. Kui selline olukord tekib, tagastage test Care diagnostics tooteinsidajale ja sellele leitakse lahendus.

Testi tulemusi ei tohi tõlgendada hiljem kui 20 minutit pärast testi läbiviimist, kuna testi tulemused ei ole enam sellel hetkel usaldusväärsed.

Info

Palun lugege hoolikalt kasutusjuhendi mõlemat poolt.

Üldine info

Muutused naise kehas mõjutavad nii normaalset raseduse kulgu kui ka loote arengut. Hormoonid on need, mis aitavad kehal kohaneda rasedusega. Kõige olulisemad raseduse hormoonid on östrogeen, progesteroon ja hCG (inimese kooriongonadotropiin). hCG tase terve, mitte raseda, naise puhul on vahemikus 0-10 IU/L (rahvusvaheline ühik liitri kohta), hCG tase tõuseb kohe esimestel päevadel pärast rasedumist. Kümendaks rasedusnädalaks on hCG tase tõusnud kuni 230 000 IU/L. Pärast lapse sündi, langeb hCG paari nädalaga normaalsele tasemele.

Sellest tulenevalt ongi hCG parim marker raseduse tuvastamiseks. Raseduse tuvastamise tundlikkuse on pisut rohkem kui 10 IU/L.

Viola rasedustesti on mitmeid aastaid edukalt kasutanud nii arstid kui ka kliinikud, kuna test pakub kiireid ja usaldusväärseid tulemusi. Kuna test kinnitab rasedust juba siis, kui hCG kontsentratsioon uriinis on nii madal kui 12 IU/L, siis sobib see testi tegemiseks juba enne järgmise menstruatsiooni algust (juba umbes 10 päeval pärast vahekorra).

OLULINE INFO

See on immunoloogiline test mis tuvastab hCG (inimese kooriongonadotropiini) uriinis. Kuigi tegemist on ülitäpse testiga, võib test väga harvadel juhtudel anda valepositiivseid tulemusi. Testi biomaterjalist komponendid (nagu näiteks antikehad) on potentsiaalselt nakkusohitlikud materjalid, kuid ei kujuta Teie tervisele mingit ohtu, kui test on läbiviidud vastavalt kasutusjuhendile.

CARE diagnostica GesmbH
Roemerstrasse 8, 2513 Moellersdorf, Austria
E-Mail: mail@care.co.at, www.carediagnostica.com

Muud juhised

Taustainfo

Testi võib läbi viia ükskõik millisel ajahetkel, kuid soovitakse siiski kasutada varahormoonkust uriini-proovi, kuna sellel ajal on hCG kontsentratsioon uriinis kõige kõrgem. Kui hCG kontsentratsioon on liiga madal, võib test anda negatiivse tulemuse, isegi siis, kui te võite rase olla.

hCG taset mõjutavad ravimid ja haigused, mis võivad samuti anda valesid tulemusi. Rasedumisvastased tabletid siiski ei mõjuta testi tulemusi kuidagi.

Kuna test on ülitäpne, tuvastab test hCG taseme juba esimestel raseduspäevadel.

Kuna aga märkimisväärset hulgal rasedusi katkeb esimesel paaril nädalal (50% esimese 1-4 nädala jooksul), võib test anda eksitavaid tulemusi.

Pakend sisaldab: karpi, fooliumpakend testpulgaj ja kuivatussainega ning kasutusjuhendit.

Lisaks vajate: kella ja vajadusel anumad (topsi) urini kogumiseks.



Enne testimist, lugege hoolikalt juhendit!

Hoidke lastele kättesaamatus kohas!

Arge kasutage testi peale säilitustähtaia möödumist!

Säilitada temperatuuril 39° - 86°F (4° - 30°C)

Test on ühekordselt kasutamiseks.

Arge võtke testipulka osadeks!

Ärge kasutage testipulka osadeks!

In-vitro diagnostikaseade koduseks testimiseks.

