


Rasedusnädala määramine: palun võrrelge oma testi tulemusi allolevate piltidega.


Kui teie testi tulemus oli positiivne (**5 minutit** uriini kogumist), siis võrrelge testi tulemusi alloleva pildiga ja leidke sobivaim variant (pildid A-C). Te saate testilt lugeda mitmes nädal on rasedustumisest või siis mitmes rasedusnädal teil hetkel on. Võib juhtuda ka, et teie testi tulemus ei kattu täpselt piltidel näidatud tulemustega, kuid võib jääda kahe pildi vahelisele alale.

EI OLE RASE

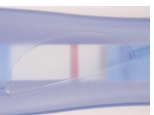

RASE

Testijoon

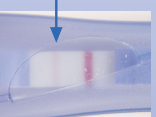

Pilt A

Nädal viljastumisest

1 - 2

Rasedusnädal

3 - 4



Pilt B

2 - 3

4 - 5



Pilt C

3 +

5 +

OLULINE INFO

Selleks et lugeda testi tulemusi õigesti, tuleb rasedusnädala määramiseks lugeda tulemusi täpselt 5 minutit pärast uriini kogumist testile. Kui testile tekib 2 joont, on test tuvastanud hCG uriinist ning te olete suure tõenäosusega rase. Testijoon värvuse tugevus ei mängi rolli. Palun konsulteerige oma arstiga.

Kuna hormoonide kontsentratsioon sõltub üksikute suurematest kõikumistest, siis harvadel juhtudel võib tulemus erineda tegelikust rasedusnädalast. Teie günekoloog määrab rasedusnädala alates viimase menstruatsiooni esimesest päevast. Sellele arvestusele vastab testi teine joon (joon, mis näitab rasedusnädalat).