

# Süüfilise kiirtest

Kat. nr IMP-204003

0344

## Oluline

- Enne testi tegemist lugege põhjalikult kasutusjuhendit.
- Test on ühekordseks kasutamiseks. Enne testi kasutamist on väga oluline kõikide juhistega tutvuda ja veenduda, et olete juhistest õigesti aru saanud. Tehke test ainult nii, nagu on juhistes kirjeldatud. Juhiste eiramine võib põhjustada valesid või ebatäpseid tulemusi.
- Säilitage toatemperatuuril (4–30 °C) ja hoidke lastele kättesaamatus kohas.
- Test ei ole mõeldud seespäraseks kasutamiseks. Vereproovi võtmisel ja testi tegemisel vältige kokkupuudet silmade ning ninaga. Ärge sööge, jooge ega suitsetage testi läheduses.
- Vältige teiste isikute kokkupuudet Teie verega, sest see võib olla nakatunud.
- Hemofiiliat põdevad või verd vedeldavaid ravimeid (antikoagulante) võtvad isikud ei või testi kasutada.
- Testi ei või kasutada pärast kõlblikkusaja lõppu (aasta ja kuu, nt 2009–08) või kahjustatud või avatud pakendi korral. Tagastage kahjustatud test ostmiskohta.
- Kohe pärast testi kasutamist pange kõik kasutatud esemed tagasi karpi ja visake ära tavaliste olmejäätmetena.
- Kui sümptomid püsivad sõltumata testi tulemusest, pöörduge arsti poole.

## Komplekti sisu:

- 1 alumiiniumkott testseadme ja kuivatusainega. Kuivatusaine kott hoiab testseadme heas seisukorras ning see ei ole testi tegemiseks vajalik.
- 1 steriilne lantsett sõrme torke teostamiseks. Lantsetti saab kasutada vaid üks kord, seega ärge kasutage lantsetti enne, kui olete testi tegemiseks valmis.
- 1 pudel testlahusega.
- 1 plaaster.



## Komplektis ei sisaldu

- kell või taimer
- paberrätikud

## Kodune SÜÜFILISE kiirtest – mida see teeb?

Lihtne kodune süüfilise test on ette nähtud süüfilist põhjustava bakteri vastaste antikehade tuvastamiseks *in vitro*. Testi on lihtne kasutada. Tulemused on käes juba 10 minutiga ja saate teada, kas Teil on nakkus või mitte.

## Kodune SÜÜFILISE kiirtest – kuidas see töötab?

Süüfilist põhjustava bakteriga nakatumise korral toodab keha selle vastu antikehi. Lihtne kodune süüfilise test võimaldab määrata nende antikehade



esinemist veres. Pärast vereproovi asetamist testribale ilmub ovaalsesse näiduavasse üks (antikehi ei esine) või kaks (antikehad esinevad) värvilist joont. Arvestage sellega, et pärast nakatumist võib kuluda veidi aega (päevi kuni nädalaid), enne kui keha toodab tuvastamiseks piisavalt antikehi. Ka pärast hiljutist kokkupuudet bakteriga võib tulemus olla negatiivne ja see ei välista nakkuse esinemist.

## SÜÜFILIS: taustteave

Süüfilis on bakteriaalne sugulisel teel leviv haigus, mida põhjustab bakter *Treponema pallidum* (Tp). Bakter võib pesitseda peenises või tupes, pärakus ja mõnikord isegi suus sõltuvalt seksuaalvahekorra tüübist. Hilisemas faasis võivad bakterid levida kogu organismis ja põhjustada kiire ravi puudumisel tõsiseid füüsilisi kahjustusi. Süüfilis on kergesti ravitav juhul, kui nakkus tuvastatakse õigeaegselt. Süüfilise nakkusel on mitu erinevat staadiumi. Esimeses staadiumis võib peenise, tupe, päraku või mõnikord suu ümbruses esineda üks või mitu haavandit. See juhtub kaks kuni kaksteist nädalat pärast süüfilisse nakatumist. Haavandid kaovad ka ilma ravita 2 kuni 3 nädala jooksul. Teine staadium algab mõne nädala kuni kuu pärast. Siis on süüfilise tekitajad levinud vereringe kaudu kogu kehas. Nahale võivad tekkida laigud ja esineda võivad gripilaadsed sümptomid. Need sümptomid kaovad samuti iseenesest. Kui süüfilist esimeses kahes staadiumis ei ravita, järgneb kolmas staadium. Süüfilise tekitajad on endiselt Teie kehas ja võivad põhjustada mitmesuguste siseelundite tõsiseid kahjustusi.


## Testimise protseduur

- 1) Kui olete valmis testi läbi viima, siis avage kott kirjaga „Syfilis” ja võtke testplaat kotist välja. Asetage testplaat puhtale tasasele pinnale. Visake väike kuivatusaine kott ära. Ärge mingil juhul seda kotikest avage.
- 2) Enne torke tegemist sõrme peske käsi seebi ja veega. Loputage neid põhjalikult ja kuivatage hoolikalt puhta rätikuga. Istuge ja lõdvestuge umbes 5 minutit, hõõrudes käsi kokku, nii et need muutuvad soojaks. Sõrm ei tohi tunduda külm ja ei tohi olla paksenenud nahaga.
- 3) Võtke lantsett, pöörake värvilist korki ja tõmmake see ära.

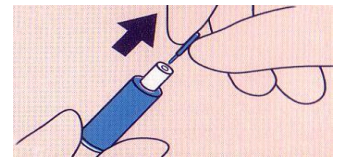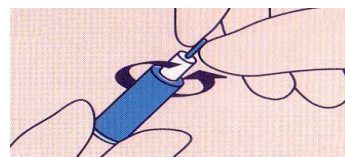


4) Pange käsi, millest vereproovi võtate, tasaselt lauale peopesaga ülespoole. Kui olete vasakukäeline, kasutage lantsetti parema käe keskmisel või neljandal sõrmel. Kui olete paremakäeline, kasutage lantsetti vasaku käe keskmisel või neljandal sõrmel. Torgake sõrmeotsa väikese sõrme poolsel küljel.

5) Asetage lantsett avaga sõrme külje vastu, nagu eespool kirjeldatud. Suruge lantsett alla. Algul liigub see allapoole kergesti, seejärel tunnete mõningat takistust. Jätkake surumist, kuni kuulete klõpsatust ja tunnete torget näpus. Pärast klõpsatust võite lantseti sõrmelt eemaldada.

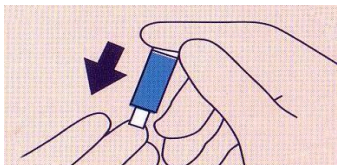

6) Pühkige ära esimene veretilk puhta paberrätikuga. Hoidke kätt verevoolu soodustamiseks umbes 10 sekundit allapoole suunatud asendis.

7) Hoidke sõrme testseadme ümara prooviava kohal ja pigistage veri välja torgatud sõrmest. Korrake pigistust, kuni moodustub veretilk. Pange veretilk ümarasse prooviavasse. Jälgige, et veretilk puudutaks ava põhja, kuid Teie sõrm ei tohi põhja puudutada. Ärge määrige verd laiali. Jätkake vere lisamist, kuni kogu testseadme ümara ava valge põhi on verega kaetud. Liiga suure verekoguse lisamine prooviavasse testi tulemusi ei mõjuta.

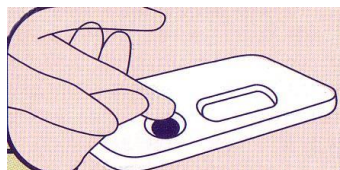


8) Lisage prooviavasse lahusepudelist 6 lahuse tilka.  
9) Pühkige ülejäänud veri sõrmelt paberrätikuga ära ja pange sõrmele plaaster.  
10) Tulemuse saate 10 minuti või maksimaalselt 15 minuti pärast.

### Testi tulemus

Testi toimumise ajal näete 10–15 minuti jooksul ovaalsesse näidukavasse ilmub üks, kaks või mitte ühtegi värvilist joont.


### Negatiivne tulemus

Ovaalsesse näiduavasse ilmub üks värviline joon. See tähendab, et test tehti õigesti ja te ei ole süüfilisse nakatunud (vt joonist 1). Kuid see võib tähendada ka seda, et bakterivastaste antikehade kontsentratsioon vereproovis oli positiivse tulemuse saamiseks liiga väike. Kui mis tahes sümptomid püsivad, soovitame pöörduda kohe perearsti poole.

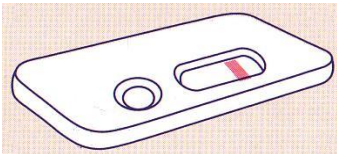

### Positiivne tulemus

Ovaalsesse näiduavasse ilmub kaks värvilist joont. Teie vereproov sisaldab süüfilist põhjustavat organismi (vt joonist 2).

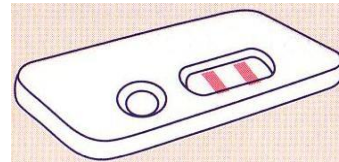

Olete väga tõenäoliselt nakatunud. Pöörduge kohe perearsti poole, sest meditsiiniline ravi on paranemiseks väga oluline. Kuid alati esineb erijuhte, mille puhul võite saada positiivse tulemuse, kuigi te ei ole hiljuti bakteriga nakatunud. Tavaliselt on selle põhjuseks sarnane organism või varasem nakkus (ravitud). Ka neil juhtudel peate kohe perearsti poole pöörduma. Perearst peab alati tellima uue laboratoorse uuringu ja seejärel määrama õige ravi.

### Kehtetu tulemus

Värvilisi jooni ei ole näha. Test ei ole õigesti tehtud. 15 minuti jooksul peaksite nägema näiduavas vähemalt ühte värvilist joont. Korrake testi 2 päeva pärast uue testiga ja värske vereprooviga. Ärge mingil juhul kasutage ebaselge tulemusega testseadet uuesti.

### Lisateave

- Süüfilise testi võib kasutada ainult süüfilist põhjustava organismi vastaste antikehade tuvastamiseks vereproovis. Juhiseid tuleb täpselt järgida. Juhiste mittejärgimise korral võite saada vale või kehtetu tulemuse.
- Ühtegi diagnoosi ei või teha ainult selle kiirtesti tulemuse põhjal. Diagnoos peab põhinema laboratoorsetel uuringutel, kliinilisel läbivaatusel ja Teie haiguslool. Selleks peate arsti poole pöörduma. Kahtluste korral pidage nõu perearstiga.
- HIV-positiivse seerumiprooviga patsientidel võib mõnikord esineda vigaseid tulemusi.
- Kui teil on küsimusi, võtke ühendust ühendust maaletoojaga.

Kasutatud sümbolite tähendus		Tootja:
	Kõlblikkusaeg	IMHOTEP Medical Products Jonckherenhof 7 6581 GC MALDEN Holland
<b>LOT</b>	Partii kood	
	Tootmiskuupäev	<b>Maaletooja:</b> Selfdiagnostics OÜ Address: Pärnu mnt 27-1, Tallinn, Eesti E-mail: info@selfdiagnostics.com Tel.: +372 623 1236 E-pood: www.Tervisetestid.ee
	Tootja	
<b>IVD</b>	<i>In vitro</i> diagnostiline meditsiiniseade	Juhendi versioon: 6. oktoober 2008
<b>LIQUID</b>	Testivedelik	
CE 0344	CE number (IVD)	