

Testi läbiviimise meetodid

Ärge avage fooliumpakendit enne, kui te ei ole valmis testi läbi viima.

Ainult testipulgaga testimine



Hoida testipulka urinijoa all 3 sekundit (vaata pilti 1).

Topsi ja testipulgaga testimine




Kasta testipulk topsi kogutud uriini sisse 3 sekundiks (vaata pilti 2)

Pane tähele: jälgige maksimaalset uriini taset!

Asetage testipulk 10 minutiks fooliumpakendi peale.

Palun vaadake lehe teiselt poolt edasist informatsiooni ja seda, kuidas hinnata ja lugeda testi tulemusi.

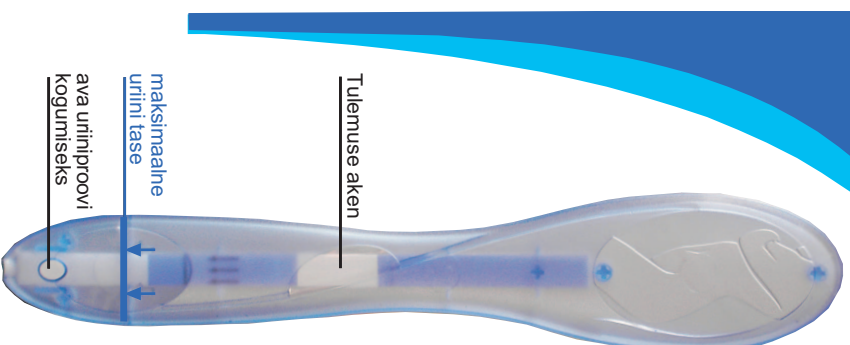


Menopausitest


Tulemuste tõlgendamine



Kui tulemuse aknasse ilmub 2 lillat joont ja alumine joon on sama tume või tumedam kui ülemine joon, siis teie testi vastus on positiivne.

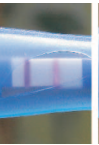

Te peaksite kordama testi teise testipulgaga täpselt näidata aja pärast. Ainult siis, kui mõlemad testid on andnud positiivse tulemuse, võite eeldada, et teil on alanud menopaus.

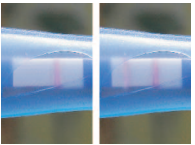

Kui tulemuse aknasse ilmub kaks lillat joont ja ülemine joon on sama tume või oluliselt tumedam kui alumine, siis see tähendab, et test on korrektselt läbiviidud, kuid menopaus ei ole veel alanud.

Testi tulemus on kehtetu, kui 5-10 minuti jooksul ei teki tulemuse aknasse ühtegi joont või kui tekib ainult ülemine testjoon.

Kehtetu tulemuse põhjuseks võib olla kahjustunud fooliumpakend, testi vale säilitamine või näiteks vähene uriini kogus. Kui selline olukord tekib, tagastage test Care diagnostica tooteesindajale ja sellele leitakse lahendus.

Tulemus on negatiivne ka siis, kui ainult üks joon tekib. Sellisel juhul ei ole vaja teist testipulka kasutada.

CARE diagnostica GesmbH
Roemerstrasse 8, 2513 Moellersdorf, Austria
E-Mail: mail@care.co.at, www.carediagnostica.com

Info

Palun lugege hoolikalt kasutusjuhendi mõlemat poolt.

Üldinfo

Kas mul on juba menopaus? Testiga on võimalik tuvastada, kas te olete juba jõudnud menopausi üleminekufaasi. Seda üleminekufaasi ehk aega pärast viimast menstruaaltsüklit, teatakse ka kui postmenopausi. Postmenopaus algab umbes 50-ndatel eluaastatel.

Menopausi alguses mängib olulist rolli hormoonide taseme kõikumine. Hormoonitaseme tootmise kõikumisest tulenevalt tekivad menopausile iseloomulikud sümptomid: kuumahood, sügelus intiimpiirkonnas, higistamine, unetus, depressioon, südameprobleemid, libiido langus, silmade kuivus, liigeste valuikkus ja probleemid ainevahetusega.

Miljal testi läbi viia?

Testi võib läbiviia ükskõik millisel ajahetkel, aga testi läbiviimiseks soovitakse siiski kasutada hommikust uriiniproovi, kuna sellel ajahetkel on FSH kontsentratsioon urinis kõige kõrgem.

OLULINE INFO

See on immuunoloogiline test, mis aitab tuvastada FSH taset (foolikulaid-stimuleeriv hormoon) urinis. Suurenenud FSH tase urinis viitab, et suure tõenäosusega on alanud menopaus, kuid testi tulemus ei ole kindlasti lõplik. Vastupidiselt, kui FSH tase ei ole tõusnud, ei tähenda see alati, et menopaus ei ole veel alanud. Testi biomaterjalist komponendid (nagu näiteks antikehad) on potentsiaalselt nakkusohhtlikud materjalid, kuid ei kujuta Teie tervisele mingit ohtu, kui testi on läbiviidud vastavalt kasutusjuhendile.

Mõned näpunäited

Taustainfo

Menopausitest tuvastab postmenopausi algust. Kuna menopausi mõjutavad mitmed tegurid, ei ole võimalik olla täiesti kindel, et olete jõudnud postmenopausini. Sellest tulenevalt, ei tohiks te selle testi põhjal teha üksinda ühtegi meditsiinilist otsust, vaid palun pöörduge kindlasti oma arsti poole.

Ka mõned ravimid, mis sisaldavad FSH-d, võivad testi tulemusi moonutada. Samuti võib test anda vale tulemusi, kui testite (enda teadmata) raseduse ajal.

Pakend sisaldab:
karpi, kaks fooliumpakendis ja kuivatussainega testipulka ja kasutusjuhendit.

Lisaks vaiate: kella ja vajadusel anumad (topsi) uriini kogumiseks.



Enne testimist, lugege hoolikalt

juhendit!

Hoidke lastele kättesaamatus

kohas!

Arge kasutage testi peale

säilitusjähtjaa moodurnisti!

Säilitada temperatuuril 39° - 86°F

(4° - 30°C)

Test on ühekordseks kasutamiseks.

Arge võtke testipulka osadeks!

Ainult välispidiseks kasutamiseks!

In-vitro diagnostikaseade koduseks

testimiseks.



0483