

Testi läbiviimise meetodid

Ärge avage fooliumpakendit enne, kui te ei ole valmis testi läbi viima.

Ainult testipulgaga testimine



Hoida testipulka urinijoa all 3 sekundit (vaata pilti 1).

Topsi ja testipulgaga testimine




Kasta testipulk topsi kogutud uriini sisse 3 sekundiks (vaata pilti 2)

Pane tähele: jälgige maksimaalset uriini taset!

Ooteaja pikkus mõlema meetodi puhul

Asetage testpulk 5 minutiks fooliumpakendi peale.

Palun vaadake lehe teiselt poolelt edasist informatsiooni, kuidas tõlgendada testi tulemusi.

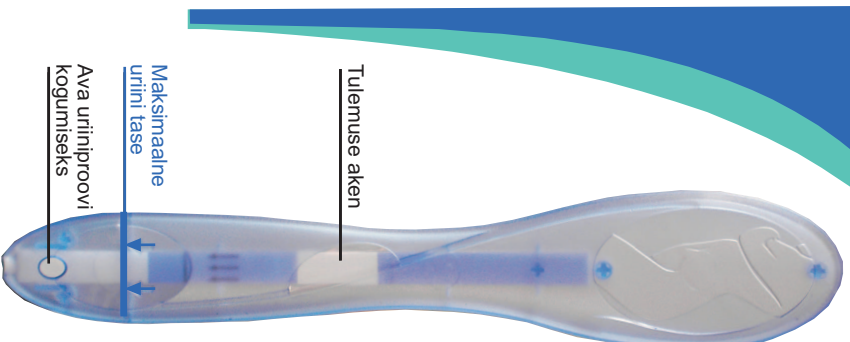

Ovulatsioonitest


Tulemuste tõlgendamine



Kui tulemuse aknasse ilmub 2 lillat joont ja alumine joon on sama tume või tumedam kui ülemine joon, siis see tähendab, et olete viljastumisevõimeline (alannud on ovulatsioonitsükkel).



Teil ei ole vaja järgnevatel päevadel (ovulatsioonitsükli ajal) uuesti testi korraldada, hoidke allesäännud ovulatsioonitestid järgmisteks tsükkliteks (kui vajaj).

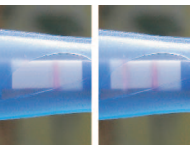

Kui tulemuse aknasse ilmub kaks lillat joont ja ülemine joon on oluliselt tumedam kui alumine joon, siis see tähendab, et test on küll korralikult läbiviidud, kuid ovulatsioonitsükkel ei ole veel alanud. Sama tulemus on ühe joone ilmumise korral. Sellisel juhul peate testima ennast järgmisel päeval, kuni positiivse tulemuseni.

Testi tulemus on kehtetu, kui 5-10 minuti jooksul ei teki tulemuse aknasse ühtegi joont või siis tekib ainult alumine testjoon.

Selle põhjuseks võib olla kahjustunud fooliumpakend, testi vale säilitamine või näiteks vähenenud uriini kogus. Kui selline olukord tekib, tegastage testi Care diagnostica tootesindajale ja sellele leialtase lahendus.

Kui testi tulemust loetakse hiljem kui 10 minutit peale testi läbiviimist, ei ole tulemused enam usaldusväärsed.

OLULINE INFO:

See on immunoloogiline test, mis tuvastab inimese luteiniseerivat hormooni (hLH) urineis. Suurenenud hLH tase urinis näitab, et suure tõenäosusega on alanud (kuid mitte kindlasti) ovulatsioonitsükkel. Kui hLH tase ei ole tõusnud, ei tähenda see alati, et ovulatsioonitsükkel ei teki. Testi biomaatrijalist komponendid (nagu näiteks antikehad) on potentsiaalselt nakkusohuliku materjali, kuid ei kujuta Teile tervisele mingit ohtu, kui test on läbiviidud vastavalt kasutusjuhendile. Seda testi ei tohiks kasutada rasedumise vältimiseks.

Info

Palun lugege hoolikalt kasutusjuhendi mõlemat poolt.

Üldinfo:

Sooivite oma partneriga peret luua? Ovulatsioonitest näitab, kas ja millal teil ovulatsioon toimub. Ovulatsioon on aeg, mil munarakk eraldub munajulist. Fertiliises eas naistel on hormoonitase (hLH – inimese luteiniseeriv hormoon) urinis vahemikus 3-15 U/L. 24 tundi enne ovulatsiooni tõuseb hormoonitase kuni 200 U/L. See test tuvastabki hormooni järsu tõusu, viidates võrreldavale viljastumise hetkele. Spermatosoidid elavad normaalses tingimustes naise kehas veel mitu päeva ja võtab aega enne, kui seemnerakk munarakuni jõuab, tõuseb hormoonitase, mis annab märku hekest, mil seksuaalvahetuskord võib suure tõenäosusega viljastumiseni. Pärast seda, üks-kaks päeva pärast ovulatsiooni kehatemperatuur tõuseb, mis omakorda tähistab ovulatsioonitsükli lõppu.

Millal test läbi viia:

Asetage kettil olev nool numbrile, mis näitab teie menstratsioonitsükli pikkust päevades. Menstratsioonitsükkel on ajavahemik ühe menstratsiooni algusest kuni järgmise menstratsiooni esimese päevani. Kuugaegne, millal ovulatsioon tõenäoliselt algab ja lõppeb, on näha väikesest ümarnagusest aknendest kettil.

Näide: Kui tsükkel on 32-päevane, siis ovulatsiooni periood algab 15. päeval pärast menstratsiooni algust ja kestab kuni 20. päevani (või kuni positiivsele tulemusle saamiseni).

Kui ovulatsiooniperiood on kindlaks tehtud, tuleks testi läbi viia (vastavalt pöördel olevatele juhistele) iga päev samal ajal, kuni on saadud testi positiivsed tulemused.

Kui eelmised menstruaaltsükid on olnud erineva pikkusega (ebaregulaarsed), siis palun kasutage viimase kuue tsükli ühimat päevade arvu ovulatsiooniaja kindlaks määramiseks.

Moned Napunaited

Taustainfo:

Seda testi kasutatakse ovulatsiooni aja ja seega ka viljastumisperioodi tuvastamiseks. Siiski mõjutavad viljakust mitmed tegurid ja ei ole võimalik eeldada, et sel perioodil Te jäte kindlasti rasedaks. Kui Te vaatamata ovulatsioonilesti kasutamisele ei ole rasedunud mitme kuu jooksul, palun pöörduge oma arsti poole.

Enamike naiste jaoks, kellel on regulaarne menstruaaltsükkel, on vis ovulatsioonilesti pulka plitsav kogus üheks ovulatsiooni korraks. Kui teie tsükkel on aeg ebaregulaarne, võib teil vaja minna lisa ovulatsioonilesti komplekti. Aega-ajalt võib juhtuda, et menstratsioonitsükli ajal ei ole olulist hLH taset tõusu, millest tulenevalt ei ole ka ovulatsiooni. Kui pärast kolme järjestikust tsükli (järgides korrektselt testi juhiseid) ei suuda Te tuvastada hLH taset tõusu, palun konsulteerige kindlasti oma arstiga.

Pakend sisaldab: karpi, fooliumpakendit koos testipudga ja kuivatusainega ning kasutusjuhendi.

Lisaks vajate: kella ja vajadusel ka puhtast anumast (topsi) uriini kogumiseks.



Enne testimist, lugege hoolikalt juhendit!
Hoidke lastele kättesaamatus kohas!
Auge kasutage testi peale salivustahjaja moodumisi!



Säilitada temperatuuril 39° - 86°F
(4° - 30° C).



Test on ühekordeks kasutamiseks.
Auge võtke testipudka osadest!
Annull välispidiseks kasutamiseks!
In-Vitro diagnostikaseade koduseks testimiseks.

CARE diagnostica GesmbH
Roemerstrasse 8, 2513 Moellersdorf,
Austria
E-Mail: mail@care.co.at, www.carediagnostica.com